



# pH Neutral Øjenskyll

Hurtig og effektiv behandling mod ættseskader



## Hurtig og afgørende hjælp

Et bilbatteri, der eksploderer, kan medføre alvorlige syreskader på øjet. Ved ulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliet til et pH-værdi omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau.

Den bedste effekt opnås før syren eller basen er trængt igennem hornhinden. Jo stærkere

syren eller basen er, jo længere neutraliseringstid. pH Neutral er en 4,9 % fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv meget stærke syrer og baser. Bufferdelen hydrogenfosfat er effektiv mod syrer, mens dihydrogenfosfat reagerer imod basiske stoffer.

Væsken består af fosfatsalte, som allerede findes naturligt i kroppen.

## Laboratorietestet effektivitet


Ved hjælp af en in vitro tiltretningsanalyse i et laboratorium, er neutraliseringseffekten af pH Neutral blevet testet over for hhv. en stærk syre og en stærk base i forhold til en almindelig øjenskyllvæske på 0,9% natriumklorid. Testens resultater viser tydeligt, at pH Neutral neutraliserer både en syre og en base til et uskadeligt pH-niveau. Til sammenligning fortynder og bortskylles en tilsvarende mængde almindelig øjenskyll væsken, men pH-værdien ændres kun ganske lidt (se figur 1 på bagsiden).


## Anbefalet brug af pH Neutral

pH Neutral er en 2 minutters øjenskylløsning til ulykker med syrer og baser (med undtagelse af calciumholdige stoffer som f.eks kalk og cement), hvor formålet med skylningen er at bringe skadestoffets pH-værdi til et uskadeligt niveau hurtigst muligt. Undersøgelser foretaget af uafhængige øjenspecialister vurderer, at 2 minutters skylletid sikrer neutralisering. Vi anbefaler at fortsætte skylningen frem til lægen med almindelig øjenskyll.



- et selskab i GD-Gruppen

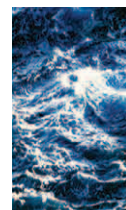

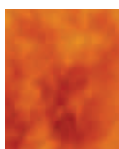

# pH Neutral Øjenskyll

## pH Neutral Øjenskyll

Varenummer:

Beskrivelse:

PL 4751

pH Neutral Øjenskyll, 200 ml

Lotek fører inden for førstehjælp også.:




**Hjertestarter** - hurtig effektiv og livreddende førstehjælp, som kan anvendes af alle.

**Øjenskyllstation** - hurtig førstehjælp mod øjenskader.

**Førstehjælpskuffert** - til akut førstehjælp direkte på skadestedet.

(kontakt Lotek for datablade eller hent dem på vores hjemmeside)

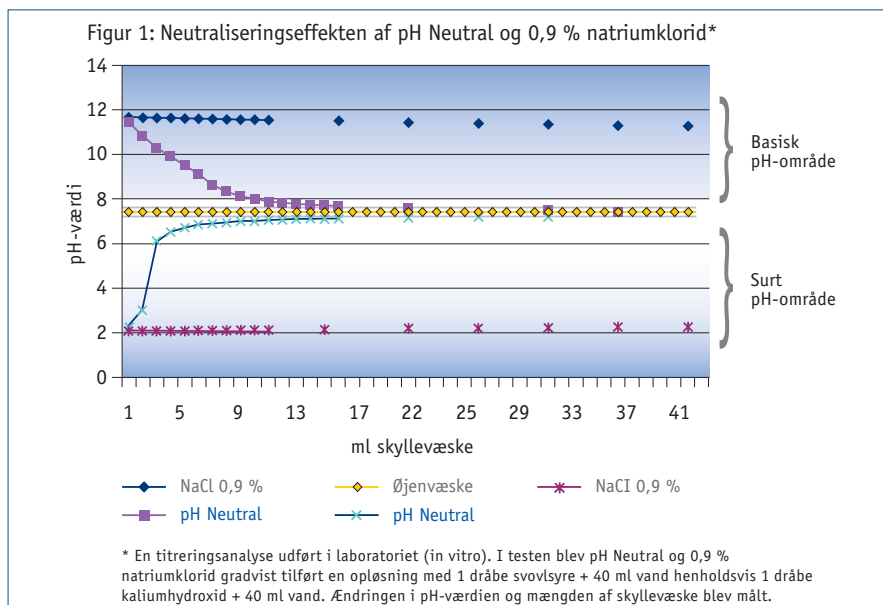

### Om Lotek A/S

Med mere end 25 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Lotek - pH Neutral Øjenskyll - 220610



- et selskab i GD-Gruppen